

Welch Allyn AudioScope® 3

Examinador rápido y preciso para pacientes de todas las edades - incluso para pediatría



Con el AudioScope® 3 de Welch Allyn, usted puede evaluar sus pacientes de forma rápida, precisa y con mayor flexibilidad. Es un procedimiento simple que solamente emplea unos segundos. Usted puede incluso utilizar el instrumento para visualizar el canal auditivo del paciente antes y durante la proyección.

Debido a que AudioScope® 3 tiene tres niveles de evaluación en una sola unidad (20, 25 y 40 dB HL), se pueden examinar todos sus pacientes con un solo instrumento. Los tonos se presentan en intervalos aleatorios, de esta manera, sus pacientes no podrán intuir cuando emite los tonos en la prueba auditiva. La variación de la frecuencia mostrará unos mejores resultados. Welch Allyn también ha incorporado un tono previo de 1000 Hz, presentado en 20 dB HL por encima del nivel de detección, por lo que los pacientes tendrán la oportunidad de "practicar" escuchando, antes del tono que se proyectará en la prueba.

El AudioScope® 3 de Welch Allyn representa lo último en tecnología en detección de audiometría, combinado con la fiabilidad por la cual Welch Allyn se ha dado a conocer.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Un Procedimiento Simple Que Emplea Sólo Unos Segundos



1. Preparar

- Siente al paciente en una habitación tranquila.
- Sitúe adecuadamente AudioSpec® del AudioScope® 3.
- Enseñar al paciente sobre el método de respuesta.
- Retirar del oído.



2. Visualice

- Seleccione el nivel de detección deseado.
- Inserte AudioScope® 3 en el canal del oído.
- Visualizar la membrana timpánica.
- Retirar del oído.



3. Inicie

- Presione el botón "start".
- Observe los indicadores de tono y las respuestas del paciente.
- Visualizar mediante la pantalla opuesta al oído.
- Retirar del oído.
- Repetir el proceso si no hay ninguna respuesta.
- Un segundo error puede indicar necesidad de derivación.

Welch Allyn AudioScope® 3

-)) La luz halógena y fibra óptica habilita una visión brillante de la membrana timpánica y el canal auditivo antes y durante el examen.
-)) Emplea aproximadamente 30-60 segundos para hacer una evaluación completa de ambos oídos.
-)) Elección de tres niveles de evaluación:
 - 20 dB HL a 500 Hz es excelente para la detección en la escuela.
 - 25 dB HL a 1000 o 2000 Hz frecuencia para la mayoría de los pacientes.
 - 40 dB HL a 4000 Hz es perfecto para la pérdida de audición relacionada con la edad.
-)) Emite tonos previos de 1000 Hz que permiten a los pacientes "practicar" primero.
-)) Pruebas realizadas para mejorar la conformidad con los pacientes.

Información para hacer pedidos

- 92682 AudioScope® 3 Completo (AudioScope® 3, juego de AudioSpecs®, transformador de carga, soporte del cargador, formularios de registro) - EUR.
- 92684 AudioScope® 3 Completo (AudioScope® 3, Juego de AudioSpecs®, transformador de carga, soporte del cargador, formularios de registro) - Reino Unido.
- 92632 AudioScope® 3 Set (AudioScope® 3, juego de AudioSpecs®, transformador de carga, formularios de registro) - EUR.
- 92634 AudioScope® 3 Set (AudioScope® 3, juego de AudioSpecs®, transformador de carga, formularios de registro) - Reino Unido.
- 23300 AudioScope® 3 con AudioSpecs® (sin transformador).
- 71123 Sólo soporte de carga.
- 71032 Transformador de carga - EUR.
- 71034 Transformador de carga - Reino Unido.
- 23400 Conjunto de AudioSpecs® (pequeño, mediano, grande).
- 23303 AudioSpec® pequeño.
- 23305 AudioSpec® mediano.
- 23307 AudioSpec® grande.
- 72.300 Batería recargable 3,5 V de níquel cadmio - Sustitución.
- 06200 Sustitución de la lámpara halógena.
- 55230 Formularios de registro - Paquete de 100.



Para obtener más información acerca del AudioScope® 3 de Welch Allyn, llame a su representante de ventas de Welch Allyn



medica sa

Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA • Telf. 932 541 540 • Fax 934 185 140
 Rodríguez San Pedro 41 • 28015 MADRID • Telf. 915 433 559 • Fax 915 447 578
 APARTADO CORREOS 6.178 • SEVILLA 41080 • Telf. 954 373 156 • Fax 954 373 156
www.abmedic.com - www.abmedica.es - www.abmedica.eu

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™